



<b>Produkt</b>	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung, rechtsbedient
<b>Produktnummer</b>	R391470000
<b>Farbe</b>	VVS:615883400 RSK:8487456 EAN:5708590368931 HMI: 123659 FDA: ILS/D135866 Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>Alle PLUS Stützklappgriffe sind mit einer integrierten Federbelastung ausgestattet, die eine kontrollierte Bewegung zwischen der waagerechten und senkrechten Position gewährleistet. Geeignet für WC's mit einer Ausladung von 540/550mm. Ersetzt die Auslaufmodelle R3560, RF560, R3570 og RF570.</p> <p><i>PLUS Stützklappgriff mit Federbelastung. Gesamtlänge 770 mm. Die Armlehne hat eine ovale Form, und der Abschluss des Griffes stützt und bietet komfortablen Halt. Rechtsbedient. Um 240 mm höhenverstellbar auf senkrechter Wandschiene und seitlich verschiebbar. Hochklappbar. Anthrazitgraue Abdeckplatte auf Wandschiene. Materialien: Aluminium mit einer 10µm Eloxschicht. Greiffläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern. Zur Nachmontage auf waagerechter PLUS Wandschiene (nicht enthalten).</i></p>
<b>Verstellung</b>	Höhen- und seitlich verstellbar
<b>Höhenverstellung</b>	240 mm
<b>Produktkapazität</b>	Maximale Belastung: 150 kg. Wenn der Stützklappgriff mit 150 kg belastet ist, wird jeder Montageschraube in dem horizontalen Wandschiene mit 44 kg belastet.  <i>PLUS Stützklappgriffe sind mit einem Gewicht von bzw. 700 kg (nahe an der Wand), 425 kg (in der Mitte) und 225 kg (an der äußersten Punkt) statisch getestet worden.</i>
<b>Materialien</b>	Der Stützklappgriff besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxschicht und ist am Ende mit einer rutschfesten, griffigen Oberfläche aus weichem SEBS-Kunststoff mit glasfaserverstärktem Nylonkern versehen. Auch der Scharnierarm ist mit weichem SEBS-Kunststoff überzogen. Interne Komponenten und Halterungen sind vorwiegend in Edelstahl ausgeführt. Die Scharnierhülse ist mit Endkappen aus ABS versehen.



<b>Produkt</b>	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung, rechtsbedient
<b>Produktnummer</b>	R391470000
<b>Ergonomie</b>	Eine weiche, rutschsicheres Oberfläche, die sich angenehm anfühlt. Die ovale Form des Stützklappgriffes stützt und bietet einen guten, komfortablen Halt. Der Abschluss des Stützklappgriffes ist ein guter Halt, wenn man sich hinsetzt bzw. aufsteht. Zugleich erhält man ein gutes Gefühl dafür, wo der Stützklappgriff endet.
<b>Funktionen</b>	Der Stützklappgriff ist hochklappbar. An der Unterseite lässt sich verschiedenes Zubehör montieren. Der Stützklappgriff ist mit einem integrierten Dämpfer ausgestattet. Mit Hilfe davon lässt sich der Stützklappgriff in einer ruhigen, gleitenden Bewegung hoch- und runterklappen.
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Lysoformin Spezial</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	Diese Produkt ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert worden.



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Stützklappgriff, 700 mm Ausladung, rechtsbedient
<b>Produktnummer</b>	R391470000

**Verwendungszweck**

Der Stützklappgriff bietet Personen, die sich beim WC-Besuch hinsetzen, aufstehen oder sich seitlich vom Rollstuhl umsetzen, sicherer Halt.

**Betriebsbedingungen**

Zum Gebrauch in Nassräumen wie Badezimmern oder Waschräumen, zuhause, in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Bei professioneller Verwendung beträgt die erwartete Lebensdauer 10 Jahre.

*Die Lebensdauer wurde gemäß ISO 17966:2016 getestet.*

Für die Wartung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung, die dem Produkt beigefügt ist und die ebenfalls auf der Webseite unter „Downloads“ gefunden werden kann.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---